

Digitální alkoholový tester CA20F

Pro dosažení správných výsledků čtěte návod výrobce a pečlivě dodržujte postup měření.

Návod k obsluze:

1. Nasadíte náustek
2. Stisknete tlačítko ON/OFF, začne odpočítávání na displeji, což je zahřívací proces senzoru 15 -35 sekund. První zobrazené číslo na displeji po zapnutí uvádí počet zkoušek.
3. Až uslyšíte zvukový signál a na displeji se zobrazí READY a nápis blo foukejte rázně do náustku po celou dobu, než se ukončí zvukový signál, to znamená, že můžete ukončit foukání. Pokud nezačnete foukat do 20 sekund přístroj se automaticky vypne.
4. Po dobu 3 – 20 sekund se výsledek měření vyhodnocuje a pak zůstane výsledek na displeji 30sekund. Pokud je výsledek 0,5 promile a větší zobrazí se nápis WARN, bude slyšet výstražný zvukový signál a displej se podbarví do červena.
5. Nakonec se přístroj automaticky vypne se zvukem.
6. Další zkoušku opakujte dle bodů 2- 5.
7. Mezi jednotlivými zkouškami udělejte přestávku alespoň 2 minuty.

Důležité informace pro použití CA20F

1. Přístroj je určen pro orientační dechovou zkoušku, analyzuje koncentraci alkoholu v krvi přesně, nepoužívejte jej však jako nástroj k pití a řízení
2. Provedení testu se doporučuje 20 minut po vypití a po kouření nejméně 1 minutu. Do přístroje nefoukejte cigaretový kouř ani tekutiny, zničí se senzor.
3. Test neprovádějte na silném větru nebo v uzavřené místnosti s kontaminovaným vzduchem.
4. Když se zobrazí „BAT“ vyměňte 9 V pouze alkalickou baterii.
Nepoužívejte dobíjecí baterie!
5. Udržujte přístroj při teplotě 0 – 40 stupňů Celsia a mimo dosah dětí.
6. Při manipulaci s krytem baterie věnujte zvýšenou pozornost zpětnému zasunutí víčka!!!
7. **CA20F vyžaduje kalibraci každých 6 - 12měsíců nebo po provedení 500 testů** pro dodržení přesných výsledků.
8. Prodávající nezaručuje možné odchylky v měření u prodávaného přístroje a přístrojů jiných typů a značek.

Technické údaje

Měřicí rozsah: 0,0 – 4,0 ‰
Rozměry: 125 x 56 x 24 mm.
Hmotnost: 131g s baterií
Baterie: 9V alkalická
Senzor: elektrochemický
Doba zahřátí: 15 – 35 sekund
Čas měření: 3-5 sekund.
Pracovní teplota: 5 – 40 stupňů Celsia
Skladovací teplota: 0 – 50 stupňů Celsia
Přesnost: +/- 10%

Kalibrace: BAC simulátor, tel. **+420541210101**, email. **info@altest.cz**



Záruka

Poskytujeme záruku na výrobní a materiálové vady výrobku (vyjma kalibrace) při běžném provozu po dobu 24 měsíců od zakoupení. V průběhu této záruky je výměna, nebo oprava přístroje, jestliže byl současně dodán doklad o koupi. Tato záruka ztrácí platnost, jestliže byl výrobek neodborně opravován nebo poškozen nedodržením návodu k obsluze.

Při nedodržení termínu kalibrace ztrácí uživatel veškerou záruku.

Hlášení na displeji

Nápis na displeji		Nápis na displeji	
	Pokud je výsledek zkoušky 0,50 promile a vyšší, zobrazí se nápis WARN se zvukovým signálem		Při nízkém napětí baterie se zobrazí nápis bat vyměňte 9V alkalickou baterii. NEPOUŽÍVEJTE DOBÍECÍ BATERIE !!!
	Pokud je výsledek zkoušky vyšší než 4,00 promile zobrazí se nápis Hot se zvukovým signálem. Nepoužívejte přístroj ihned po požití alkoholu, vyčkejte min. 20 minut		Nápis Flo se zobrazí při krátké době foukání do přístroje. Foukejte do přístroje min. 3 sekundy Stiskněte tlačítko On/Off pro provedení dalšího testu
	500 měření zobrazí se nápis CAL je nutná kalibrace. Kalibrace je nutná po půl roce nebo po 500 měřeních, co nastane dříve.		Pokud je okolní teplota mimo rozsah teploty (0 - 40 C), zobrazí se nápis OUT a přístroj se vypne. Udržujte a používejte přístroj v doporučeném rozsahu teplot

Dovoz, prodej, servis a kalibrace digitálních detektorů alkoholu.

Altest s.r.o.
 Jugoslávská 124 a
 613 00 Brno
 Czech republic
 IČO: 29185190
 DIČ: CZ29185190
 Tel. +420 541 210 101
 Mob. +420 603 427 912
 +420 603 180 831
 Fax. +420 541 249 191
 E-mail. info@altest.cz
www.altest.cz

Digitální alkoholový tester CA20F s elektrochemickým senzorem

Návod k obsluze




altest
 TESTY NA ALKOHOL
www.altest.cz